



STIMULUS

Estimulación automática de las cerdas

- Una manera eficiente de estimular a las cerdas
- Consiga que la cantidad de lechones nacidos sea mayor
- La inseminación puede ser llevada a cabo por un solo trabajador
- Proceso fácil de controlar
- Sistema electrónico integrado que controla la presión de aire en la bomba
- El sistema electrónico está alimentado por una batería recargable integrada.



STIMULUS

Estimulación automática de las cerdas en la inseminación

Stimulus está haciendo una estimulación automática en la inseminación. La estimulación se hace en dos fases - en 2 programas. El primer programa empieza cuando Stimulus se enciende; este estimulará a la cerda intensamente con fuertes presiones en la espalda y en el.

Este programa dura 60 segundos - y cuando termina, el programa 2 se activa automáticamente.

El otro programa "suave" estimula a la cerda con presiones/ opresiones en la ingle de la cerda. Conlleva sólo a un trabajador vigilar 3 Stimulus. Por ejemplo, el trabajador coloca el primer Stimulus en la cerda nº 1 y activa el proceso de estimulación presionando el botón on/off de Stimulus. Después de esto el trabajador coloca Stimulus nº 2 en la cerda nº 2 y lo activa - y coloca el nº 3 en la cerda nº 3.

Después de haber colocado los 3 Stimulus, la primera cerda estará preparada para la inseminación en sí, donde un catéter y la bolsa de semen -

la botella de semen - tubo o bolsa - se pueden colocar en el soporte especial el es colocado al final de las "antenas" en el Stimulus.

Cuando la cerda nº 3 es inseminada el primer Stimulus estará preparado para colocarlo en la cerda nº4 de la fila.

De esta manera, la inseminación puede llevarse a cabo por un solo empleado - y consecuentemente ahorrar valioso tiempo para otros lugares de la producción. Los movimientos que Stimulus realiza para apretar y estimular la cerda se llevan a cabo con aire y una bomba a presión que se monta sobre el Stimulus. El sistema electrónico integrado controla el aire a presión en la bomba.

El sistema electrónico está alimentado por una batería recargable integrada y se recarga con un cargador a 220V que la acompaña. Éste puede ser enchufado a Stimulus en el lado superior. El aire a presión es añadido a través de un cable en espiral que está conectado en la parte superior de Stimulus.



ESPECIFICACIONES SOBRE STIMULUS

Stimulus Artículo núm. 560520

Multi-soporte para Stimulus Artículo núm. 560521



El cuadro inferior muestra los resultados de Stimulus en 22 producciones porcinas 10 semanas antes de empezar a usar el Stimulus y 10 semanas después de empezar a usar Stimulus.

Núm. de partos		Partos %	Total de nacidos
13.741	Partos % y número total de nacidos 10 semanas antes de empezar con Stimulus	85,21	15,93
14.211	Partos % y número total de nacidos 10 semanas después de empezar con Stimulus	89,87	16,28
	Incremento	+4,66	+0,35

Resultados de Stimulus de 4 producciones porcinas - Total de nacidos

Total de nacidos	De bajo a aceptable		De alto a mejor	
	1	2	3	4
Producción porcina				
Antes	13,48	14,89	15,72	16,32
Después	14,13	15,11	16,22	16,55
Incremento	00,65	00,22	00,50	00,23

Resultados de Stimulus de 4 producciones porcinas - Partos %

Partos %	De bajo a aceptable		De alto a mejor	
	1	2	3	4
Producción porcina				
Antes	81,21	82,62	88,78	92,30
Después	89,98	88,53	91,18	92,39
Incremento	8,86	5,91	2,40	00,09

Sujeto a cambios en materiales y diseño.

B-8803-ES



ACO FUNKI A/S
C/ Major 52, 1º 1ª
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telf.: +34 93 565 07 27
www.acofunki.com

